

フルティフォーム®をお使いになる患者さんへ

フルティフォーム®用吸入トレーナーは
フルティフォーム®の吸入方法を
練習するための器具です。

吸入トレーナー
(フルプッシュ®*装着時)
*噴霧補助具



フルティフォーム®
(フルプッシュ®装着時)




※吸入トレーナーに薬剤は含まれておりません。

使い方の動画はこちら▶



フルプッシュ®の装着方法

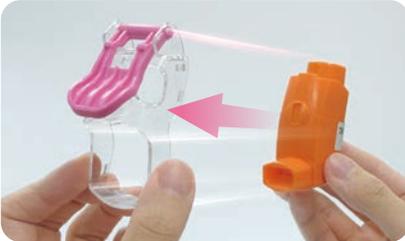

写真のように、吸入トレーナーをフルプッシュ®の後ろ側から差し込みます。カチッと音がするまで確実に装着してください。

吸入トレーナーを使った吸入練習方法

フルプッシュ® (噴霧補助具) を装着しています。



吸入器をよく振り、軽く息を吐きます。



吸入口を軽く歯でくわえ、
レバーを押し、3秒くらいかけて
ゆっくり深く吸い込みます。




ゆっくり吸入すると、
音がなります。

注意：処方されたお薬(フルティフォーム®)を吸入しても
笛の音はなりません。



吸入がはやかったり、強く吸いすぎると、
音はなりません。
音になるように吸入してください。

フルティフォーム®も
ゆっくり深く吸いましょう。

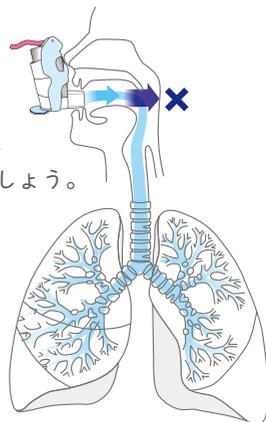

管理用コード

作成年月：2024.1
ICFF0054

